



Bezwonny



Bez Etanolu



Bezpieczny

dezynfekcja BEZ etanolu

KATALOG PRODUKTÓW



beprosave-shop.com

- Ręce
- Urządzenia i powierzchnie medyczne
- Przemysł spożywczy i piony żywienia
- Biofilm bakteryjny

POLSKI PRODUCENT

**Medipharm International
sp. z o. o. sp. k.**

 ul. Emilii Szczanieckiej nr 20b,
64-316 Kuślin

 info@beprosave-shop.com

 www.beprosave-shop.com

produkt	opis	opakowanie		
 proSAVE Prontech RTU 400 ppm	Bakteriobójczy płyn do higienicznej dezynfekcji rąk. Dezynfekcja podstawowa, częsta.	 50 ml PET spray kieszonkowy	 500 ml PET pompka	 5 L kanister zakręcany
 proSAVE Prontech RTU 800 ppm	Płyn bez etanolu do częstej, higienicznej dezynfekcji rąk, do stosowania w obszarze medycznym.	 50 ml PET spray kieszonkowy	 500 ml PET pompka	 1 litr pompka  5 L kanister zakręcany
 proSAVE One Step RTU 1000	100 ml delikatna pianka do dezynfekcji rąk. Bez etanolu, 200 ml Piana bez etanolu do higienicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym.	 100 ml pompka spieniająca	 200 ml pompka spieniająca	
 proSAVE One Step RTU 1000	Dezynfekcja bez etanolu powierzchni i urządzeń w sektorze medycznym.	 Butelka z długą szyjką Trigger Spray 1 L	 5 L kanister zakręcany	
 proSAVE RTU20 PŁYN	Silna dezynfekcja powierzchni i urządzeń narażonych na biofilm bakteryjny. Nie zawiera etanolu. Postać płynu. Naturalizuje zapachy.	 Butelka z długą szyjką Trigger Spray 1 L	 5 L kanister zakręcany	 Mauzer 1000 L
 proSAVE RTU20 PIANA	Silna dezynfekcja powierzchni i urządzeń narażonych na biofilm bakteryjny. Nie zawiera etanolu. Postać piany. Neutralizuje zapachy.	 Butelka z długą szyjką Trigger Piana 1 L	 5 L kanister zakręcany	 Mauzer 1000 L
 proSAVE One Step RTU 1000	Dezynfekcja powierzchni, urządzeń i wyposażenia obiektów sportowych, rehabilitacyjnych i hotelarskich. Nie zawiera etanolu.	 Butelka z długą szyjką Trigger Spray 1 L	 5 L kanister zakręcany	
 proSAVE One Step RTU 1000	Szybko działająca dezynfekcja powierzchni i urządzeń w gospodarstwach domowych.	 Butelka z długą szyjką Trigger Spray 1 L		
 proSAVE Prontech RTU 800 ppm	Uniwersalna dezynfekcja dla przemysłu spożywczego, części socjalnych oraz higienicznej dezynfekcji rąk. Nie zawiera etanolu.	 Butelka z długą szyjką Trigger Spray 1 L	 5 L kanister zakręcany	 Mauzer 1000 L
 proSAVE One Step RTU 1000	Szybko działająca dezynfekcja powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym.	 Butelka z długą szyjką Trigger Piana 1 L	 Butelka z długą szyjką Trigger Spray 1 L	 5 L kanister zakręcany  Mauzer 1000 L



PODSTAWOWA DEZYNFEKCJA RĄK W PŁYNIE

Nazwa produktu proSAVE Prontech 400 ppm bakteriobójczy płyn do dezynfekcji rąk

Opis Preparat bakteriobójczy do higienicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze.

Właściwości Preparat bakteriobójczy do higienicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze, do wielokrotnego użycia w ciągu dnia pracy. Doskonałe właściwości bakteriobójcze. Przebadany dermatologicznie, nie powoduje reakcji alergicznych. W szczególności nadaje się do podstawowej, szybkiej, częstej dezynfekcji rąk dzieci, osób starszych, pracowników firm jako uzupełnienie bieżącej higieny.

Opis przedmiotu zamówienia Bakteriobójczy płyn do dezynfekcji rąk bez etanolu, zawiera czwartorzędowe sole amonowe w stężeniu 0,4g/L. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Przebadany dermatologicznie. Znajduje zastosowanie bez użycia wody oraz w przypadkach gdy nie można stosować środków na bazie alkoholu.

Zastosowanie Higieniczna dezynfekcja rąk w sektorze publicznym i spożywczym.

Czas kontaktu 30 sekund

Skład Czwartorzędowe sole amonowe 0,4g/L

Numer Decyzji Rejestracyjnej 8398/21 z dnia 16.03.2021

**Opakowanie/
numer katalogowy**



**Spray
kieszkowy
50 ml**

Opakowanie:
50 ml PET
spray kieszkowy
Numer katalogowy:
IS400A2B9X1



**Pompka
500 ml**

Opakowanie:
500 ml PET
pompka
Numer katalogowy:
IS400A3B1X1



**Kanister
5 L**

Opakowanie:
5 L
kanister
Numer katalogowy:
IS400A4B2X1

**Skuteczność
mikrobiologiczna
Procedura/
Mikroorganizm/
Norma/
Czas działania**

Bakteriobójczy/ Higieniczna dezynfekcja rąk/ EN1500/30 sekund



Nazwa produktu proSAVE Prontech RTU 800 ppm płyn do dezynfekcji rąk

Opis Płyn bez etanolu do higienicznej dezynfekcji rąk.

Właściwości Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze, bez zawartości etanolu. Nadaje się do wielokrotnego użycia w ciągu dnia pracy. Doskonałe właściwości bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz bójcze wobec wirusów otoczkowych. Przebadany dermatologicznie, nie powoduje reakcji alergicznych. W szczególności nadaje się do podstawowej, szybkiej, częstej dezynfekcji rąk w sektorach o wysokich standardach higieny pracy.

Opis przedmiotu zamówienia Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk w placówkach ochrony zdrowia, tj. szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, i inne. Higieniczna dezynfekcja rąk wg. EN 1500, 3ml w czasie 30 sekund. Produkt nie zawiera etanolu. Zawiera czwartorzędowe sole amonowe w stężeniu nie przekraczającym 0,1%. W karcie charakterystyki w sekcji 2.2 brak zagrożeń. Nie zawiera barwników. Nie zawiera etanolu. Nie zawiera alkoholu.

Zastosowanie Higieniczna dezynfekcja rąk w sektorze medycznym, publicznym i spożywczym.

Czas kontaktu 30 sekund

Skład Czwartorzędowe sole amonowe 0,8g/L

Numer Decyzji Rejestracyjnej 8397/21 z dnia 16.03.2021

**Opakowanie/
numer katalogowy**



**Spray
kieszonkowy
50 ml**

Opakowanie:
50 ml PET
spray kieszonkowy
Numer katalogowy:
IS800A2B9X2



**Pompka
500 ml**

Opakowanie:
500 ml PET
pompka
Numer katalogowy:
IS800A3B1X2



**Pompka
1 L**

Opakowanie:
1 litr
pompka
Numer katalogowy:
IS800A1B1X2



**Kanister
5 L**

Opakowanie:
5 L
kanister
Numer katalogowy:
IS400A4B2X1

**Skuteczność
mikrobiologiczna
Procedura/
Mikroorganizm/
Norma/
Czas działania**

Bakteriobójczy/ Drożdżakobójczy/ Wirusobójczy/ EN 1500/ 30 sekund



Nazwa produktu	proSAVE One Step RTU 1000 piana do dezynfekcji rąk		
Opis	Delikatna pianka do dezynfekcji rąk. Bez etanolu.		
Właściwości	Pianka dezynfekcyjna, przeznaczona do higienicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, w obiektach użyteczności publicznej, w przemyśle spożywczym, w gospodarstwach domowych. Posiada właściwości bakteriobójcze, bójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym i bójcze wobec wirusów ośtonkowych. Polecana przez farmaceutów dla dzieci i seniorów, osób dorosłych oraz wszędzie tam gdzie występuje narażenie na patogeny chorobotwórcze w obrębie skóry.		
Opis przedmiotu zamówienia	Biobójcza piana do dezynfekcji rąk bez etanolu, do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, tj. szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, i inne. Higieniczna dezynfekcja rąk wg. EN 1500, zawiera czwartorzędowe sole amonowe w stężeniu nie większym niż 0,1%. Zarejestrowana jako produkt biobójczy. Przebadana dermatologicznie. Znajduje zastosowanie bez użycia wody. W karcie charakterystyki w sekcji 2.2 brak zagrożeń. Nie zawiera barwników. Nie zawiera etanolu.		
Zastosowanie	Higieniczna dezynfekcja rąk w sektorze medycznym, publicznym i spożywczym.		
Czas kontaktu	30 sekund		
Skład	Czwartorzędowe sole amonowe 1g/L		
Numer Decyzji Rejestracyjnej	9454/23 z dnia 25.08.2023		
Opakowanie/ numer katalogowy	 Pompka spieniąca 100 ml DELIKATNA PIANKA Opakowanie: 100 ml pompka spieniąca Numer katalogowy: IS1000A6B5X3  Pompka spieniąca 200 ml PIANA BEZ ETANOLU Opakowanie: 200 ml pompka spieniąca Numer katalogowy: IS1000A8B5X3		
Skuteczność mikrobiologiczna Procedura/ Mikroorganizm/ Norma/ Czas działania	Bakteriobójczy/ Drożdżakobójczy/ Wirusobójczy/ EN 1500/ 30 sekund		



Nazwa produktu proSAVE One Step RTU 1000 dezynfekcja powierzchni i urządzeń medycznych

Opis **Dezynfekcja bez etanolu do powierzchni i urządzeń w sektorze medycznym. Produkt dezynfekcyjny w postaci płynu do opryskiwania, przecierania, zamaczania, zanurzania.**

Właściwości Gotowy do użycia. Posiada właściwości bakteriobójcze, bójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym i bójcze wobec wirusów oślonkowych. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w obszarze medycznym. Powierzchnie i urządzenia w Sektorze medycznym i wszystkich obiektach służby zdrowia, takich jak szpitale, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, przychodnie zdrowia, domy opieki, sanatoria, gabinety kosmetyczne, inne podobne.

Opis przedmiotu zamówienia Płyn do dezynfekcji stosowany do częstego użycia na powierzchni i urządzenia w sektorze medycznym i wszystkich obiektach służby zdrowia, takich jak szpitale, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, przychodnie zdrowia, domy opieki, sanatoria, gabinety kosmetyczne. Produkt nie zawiera etanolu. W karcie charakterystyki w sekcji 2.2 brak zagrożeń. Nie zawiera barwników. Nie zawiera alkoholu. Przebadany dermatologicznie, nie powoduje reakcji alergicznych. Produkt biobójczy. Produkt nie jest łatwopalny.

Zastosowanie **Dezynfekcja powierzchni i urządzeń w sektorze medycznym.**

Czas kontaktu 1 minuta

Skład Czwartorzędowe sole amonowe 1g/L

Numer Decyzji Rejestracyjnej 9454/23 z dnia 25.08.2023

**Opakowanie/
numer katalogowy**



Opakowanie:
Butelka z długą szyjką Trigger Spray 1 L
Numer katalogowy: IS1000A7B6X4



Opakowanie:
Kanister zakręcany 5 L
Numer katalogowy: IS1000A4B2X4

**Skuteczność mikrobiologiczna
Procedura/
Mikroorganizm/
Norma/
Czas działania**

Bakteriobójczy, w tym: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Enterococcus hirae, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes.
Bójczy wobec grzybów drożdżopodobnych, w tym Candidia albicans.
Wirusobójczy wobec wszystkich wirusów otoczkowanych, oznacza wszystkie wirusy otoczkowane wymienione w Annex A normy EN 14476, takie jak HBV, HCV, HIV, jak również wirusy z rodziny orthomyxoviridae (w tym wszystkie wirusy grypy), koronawirusy (w tym MERS-CoV, SARS-CoV-1, i SARS-CoV-2) oraz filowirusy, w tym wirus Ebola. EN 14476 1 min., EN 13727 1 min., EN 13624 1 min., EN 1500 30 s., EN 1276 1 min., EN 1650 1 min., EN 13697 5 min.



Nazwa produktu proSAVE RTU 20 silna dezynfekcja w płynie działa na biofilm bakteryjny

Opis Płyn. Silna dezynfekcja do przecierania, opryskiwania lub zalewania powierzchni i urządzeń narażonych na biofilm bakteryjny. Nie zawiera etanolu.

Właściwości Preparat dezynfekcyjny, posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym oraz ograniczone działanie wirusobójcze przeciwko wirusom otoczkowym. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w obszarze medycznym, w przemyśle spożywczym, w obiektach użyteczności publicznej. Przeznaczony jest w szczególności do powierzchni narażonych na biofilm bakteryjny, są to duże powierzchnie, trudno dostępne powierzchnie, urządzenia przepływowe, kanalizacja, odpływy, zanieczyszczenia trwałe.

Opis przedmiotu zamówienia Płyn do dezynfekcji powierzchni i urządzeń w placówkach ochrony zdrowia, tj. szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, sanatoria oraz w placówkach związanych z przetwarzaniem lub przygotowywaniem żywności. Produkt nie zawiera etanolu. W karcie charakterystyki w sekcji 2.2 brak zagrożeń. Nie zawiera barwników. Nie zawiera alkoholu. Przebadany dermatologicznie, nie powoduje reakcji alergicznych. Produkt biobójczy. Produkt nie jest łatwopalny.

Zastosowanie Dezynfekcja powierzchni narażonych na biofilm bakteryjny.

Czas kontaktu 1 minuta

Skład Czwartorzędowe sole amonowe 2g/L

Numer Decyzji Rejestracyjnej 8874/22 z dnia 20.04.2022

**Opakowanie/
numer
katalogowy**



**Trigger
Spray
1 L**

Opakowanie:
Butelka z długą szyjką
Trigger Spray 1 L
Numer katalogowy:
IS2000A7B6X5



**Kanister
5 L**

Opakowanie:
Kanister zakręcany 5 L
Numer katalogowy:
IS2000A4B2X5



**Mauzer
1000 L**

Opakowanie:
Mauzer 1000 L
Numer katalogowy:
IS2000A5B4X5

**Skuteczność
mikrobiologiczna
Procedura/
Mikroorganizm/
Norma/
Czas działania**

Bakteriobójczy, w tym: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Enterococcus hirae, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes.
Bójczy wobec grzybów drożdżopodobnych, w tym Candida albicans.
Wirusobójczy wobec wszystkich wirusów otoczkowanych, oznacza wszystkie wirusy otoczkowane wymienione w Annex A normy EN 14476, takie jak HBV, HCV, HIV, jak również wirusy z rodziny orthomyxoviridae (w tym wszystkie wirusy grypy), koronawirusy (w tym MERS-CoV, SARS-CoV-1, i SARS-CoV-2) oraz filowirusy, w tym wirus Ebola. EN 14476 1 min., EN 13727 1 min., EN 13624 1 min., EN 1500 30 s., EN 1276 1 min., EN 1650 1 min., EN 13697 5 min., EN 13623 Legionella spp.



Nazwa produktu	proSAVE RTU 20 silna dezynfekcja w pianie działa na biofilm bakteryjny
Opis	Piana. Silna dezynfekcja w postaci piany do przecierania, opryskiwania lub zalewania. Postać piany do powierzchni i urządzeń narażonych na biofilm bakteryjny. Nie zawiera etanolu.
Właściwości	Preparat dezynfekcyjny, posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym oraz ograniczone działanie wirusobójcze przeciwko wirusom otoczkowym. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w obszarze medycznym, w przemyśle spożywczym, w obiektach użyteczności publicznej. Przeznaczony jest w szczególności do powierzchni narażonych na biofilm bakteryjny, są to duże powierzchnie, trudno dostępne powierzchnie, urządzenia przepływowe, kanalizacja, odpływy, zanieczyszczenia trwałe.
Opis przedmiotu zamówienia	Piana do dezynfekcji powierzchni i urządzeń w placówkach ochrony zdrowia, tj. szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, sanatoria oraz w placówkach związanych z przetwarzaniem lub przygotowywaniem żywności. Produkt nie zawiera etanolu. W karcie charakterystyki w sekcji 2.2 brak zagrożeń. Nie zawiera barwników. Nie zawiera alkoholu. Przebadany dermatologicznie, nie powoduje reakcji alergicznych. Produkt biobójczy. Produkt nie jest łatwopalny.
Zastosowanie	Dezynfekcja powierzchni narażonych na biofilm bakteryjny.
Czas kontaktu	1 minuta
Skład	Czwartorzędowe sole amonowe 2g/L
Numer Decyzji Rejestracyjnej	8874/22 z dnia 20.04.2022

**Opakowanie/
numer
katalogowy**



**Trigger
Piana
1 L**

Opakowanie:
Butelka z długą szyjką
Trigger Piana 1 L
Numer katalogowy:
IS2000A7B7X6



**Kanister
5 L**

Opakowanie:
Kanister zakręcany 5 L
Numer katalogowy:
IS2000A4B2X6



**Mauzer
1000 L**

Opakowanie:
Mauzer 1000 L
Numer katalogowy:
IS2000A5B4X6

**Skuteczność
mikrobiologiczna
Procedura/
Mikroorganizm/
Norma/
Czas działania**

Bakteriobójczy, w tym: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Enetrococcus hirae, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes.
Bójczy wobec grzybów drożdżopodobnych, w tym Candidia albicans.
Wirusobójczy wobec wszystkich wirusów otoczkowanych, oznacza wszystkie wirusy otoczkowane wymienione w Annex A normy EN 14476, takie jak HBV, HCV, HIV, jak również wirusy z rodziny orthomyxoviridae (w tym wszystkie wirusy grypy), koronawirusy (w tym MERS-CoV, SARS-CoV-1, i SARS-CoV-2) oraz filowirusy, w tym wirus Ebola. EN 14476 1 min., EN 13727 1 min., EN 13624 1 min., EN 1500 30 s., EN 1276 1 min., EN 1650 1 min., EN 13697 5 min., EN 13623 Legionella spp.



Nazwa produktu	proSAVE One Step RTU 1000 dezynfekcji powierzchni i urządzeń Reha Sport HoReCa
Opis	Dezynfekcja do powierzchni, urządzeń i wyposażenia obiektów sportowych, rehabilitacyjnych i hotelarskich. Nie zawiera etanolu. Produkt dezynfekcyjny w postaci płynu do opryskiwania, przecierania, zamaczania, zanurzania.
Właściwości	Gotowy do użycia. Posiada właściwości bakteriobójcze, bójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym i bójcze wobec wirusów otoczkowych. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą powierzchni, urządzeń i wyposażenia obiektów sportowych, rehabilitacyjnych i hotelarskich.
Opis przedmiotu zamówienia	Płyn do dezynfekcji stosowany do częstego użycia na powierzchnie i urządzenia w siłowniach, na salach treningowych i rehabilitacyjnych, do urządzeń stałych, sprzętów ruchomych, mat treningowych, materacy, łóżek. Stosować w miejscach przebywania i gromadzenia ludzi, pomieszczeniach socjalnych, HoReCa. Produkt nie zawiera etanolu. W karcie charakterystyki w sekcji 2.2 brak zagrożeń. Nie zawiera barwników. Nie zawiera alkoholu. Przebadany dermatologicznie, nie powoduje reakcji alergicznych. Produkt biobójczy. Produkt nie jest łatwopalny.
Zastosowanie	Dezynfekcja powierzchni i urządzeń w sektorze publicznym.
Czas kontaktu	1 minuta
Skład	Czwartorzędowe sole amonowe 1g/L
Numer Decyzji Rejestracyjnej	9454/23 z dnia 25.08.2023

**Opakowanie/
numer
katalogowy**



**Trigger
Spray
1 L**

Opakowanie:
Butelka z długą szyjką Trigger Spray 1 L
Numer katalogowy: IS1000A7B6X7



**Kanister
5 L**

Opakowanie:
Kanister zakręcany 5 L
Numer katalogowy: IS1000A7B6X7

**Skuteczność
mikrobiologiczna
Procedura/
Mikroorganizm/
Norma/
Czas działania**

Bakteriobójczy, w tym: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Enterococcus hirae, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes.
Bójczy wobec grzybów drożdżopodobnych, w tym Candida albicans.
Wirusobójczy wobec wszystkich wirusów otoczkowanych, oznacza wszystkie wirusy otoczkowane wymienione w Annex A normy EN 14476, takie jak HBV, HCV, HIV, jak również wirusy z rodziny orthomyxoviridae (w tym wszystkie wirusy grypy), koronawirusy (w tym MERS-CoV, SARS-CoV-1, i SARS-CoV-2) oraz filowirusy, w tym wirus Ebola. EN 14476 1 min., EN 13727 1 min., EN 13624 1 min., EN 1500 30 s., EN 1276 1 min., EN 1650 1 min., EN 13697 5 min.



Nazwa produktu

proSAVE Prontech RTU 800 ppm uniwersalna dezynfekcja w sektorze spożywczym

Opis

Uniwersalna dezynfekcja wszystkich powierzchni, urządzeń i wyposażenia w przemyśle spożywczym, w częściach socjalnych oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Nie zawiera etanolu.

Właściwości

Preparat dezynfekcyjny, posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym oraz ograniczone działanie wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym, w obiektach użyteczności publicznej. Ponadto produkt może być użyty do higienicznej dezynfekcji rąk.

Opis przedmiotu zamówienia

Preparat dezynfekcyjny Prontech RTU 800 ppm, posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym oraz ograniczone działanie wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych w zakładach przemysłu spożywczego, napojowego, browarniczego, mleczarskiego i mięsnego związanych z produkcją, transportem oraz przechowywaniem żywności i pasz. Przeznaczony jest do dezynfekcji urządzeń i powierzchni zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Dla dezynfekcji powierzchni i wyposażenia należy nanieść preparat na powierzchnie z użyciem czystej szmatki, gąbki, mopa albo przez natrysk, pozostawić do przereagowania na zalecony czas, a następnie spłukać czystą wodą albo pozostawić do wyschnięcia. Dla dezynfekcji powierzchni i wyposażenia należy: dla działania bakteriobójczego stosować czas kontaktu 5 minut, przeciwko grzybom drożdżopodobnym stosować czas kontaktu 15 minut, przeciwko wirusom otoczkowym stosować czas kontaktu 1 minuta. Powierzchnie stykające się bezpośrednio z żywnością i środkami żywienia zwierząt spłukiwać wodą zdatną do picia.

Zastosowanie

Uniwersalna dezynfekcja wszystkich powierzchni, urządzeń i wyposażenia w przemyśle spożywczym, w częściach socjalnych oraz do higienicznej dezynfekcji rąk.

Czas kontaktu

15 minut powierzchnie / 30 sekund ręce

Skład

Czwartorzędowe sole amonowe 0,8g/L

Numer Decyzji Rejestracyjnej

8397/21 z dnia 16.03.2021

**Opakowanie/
numer katalogowy**



**Trigger
Spray
1 L**

Opakowanie: Butelka z długą szyjką Trigger Spray 1 L
Numer katalogowy: IS800A7B6X9



**Kanister
5 L**

Opakowanie: Kanister zakręcany 5 L
Numer katalogowy: IS800A4B2X9



**Mauzer
1000 L**

Opakowanie: Mauzer 1000 L
Numer katalogowy: IS800A5B4X9

**Skuteczność mikrobiologiczna
Procedura/
Mikroorganizm/
Norma/
Czas działania**

Bakteriobójczy, w tym: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Enterococcus hirae, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes.
Bójczy wobec grzybów drożdżopodobnych, w tym Candida albicans.
Wirusobójczy wobec wszystkich wirusów otoczkowanych, oznacza wszystkie wirusy otoczkowane wymienione w Annex A normy EN 14476, takie jak HBV, HCV, HIV, jak również wirusy z rodziny orthomyxoviridae (w tym wszystkie wirusy grypy), koronawirusy (w tym MERS-CoV, SARS-CoV-1, i SARS-CoV-2) oraz filowirusy, w tym wirus Ebola. EN 14476 1 min., EN 13727 1 min., EN 13624 1 min., EN 1500 30 s., EN 1276 1 min., EN 1650 1 min., EN 13697 5 min.



Nazwa produktu

proSAVE One Step RTU 1000 szybko działająca dezynfekcja w sektorze spożywczym

Opis

Szybko działająca dezynfekcja powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym. Nie zawiera etanolu. Produkt dezynfekcyjny w postaci płynu do opryskiwania, przecierania, zamaczania, zanurzania.

Właściwości

Preparat dezynfekcyjny One Step RTU1000, przeznaczony jest do dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i wyposażenia, zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością w sektorze medycznym, domach opieki, sanatoriach, placówkach użyteczności publicznej, w hotelach, restauracjach oraz w gospodarstwach domowych. Posiada właściwości bakteriobójcze, bójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych.

Opis przedmiotu zamówienia

Preparat dezynfekcyjny One Step RTU1000, posiada właściwości bakteriobójcze i bójcze przeciwko grzybom drożdżopodobnym oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych w zakładach przemysłu spożywczego, napojowego, browarniczego, mleczarskiego i mięsnego związanych z produkcją, transportem oraz przechowywaniem żywności i pasz. Przeznaczony jest do dezynfekcji urządzeń i powierzchni zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Produkt nie zawiera etanolu. W karcie charakterystyki w sekcji 2.2 brak zagrożeń. Nie zawiera barwników. Nie zawiera alkoholu. Przebadany dermatologicznie, nie powoduje reakcji alergicznych. Produkt biobójczy. Produkt nie jest łatwopalny.

Zastosowanie

Dla szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia w przemyśle spożywczym i pionie żywieniowym.

Czas kontaktu

1 minuta

Skład

Czwartorzędowe sole amonowe 1g/L

Numer Decyzji Rejestracyjnej

9454/23 z dnia 25.08.2023

Opakowanie/
numer katalogowy



**Trigger
Spray
1 L**

Opakowanie:

Butelka z długą szyjką
Trigger Spray 1 L

Numer katalogowy:

IS1000A7B6XX1



**Kanister
5 L**

Opakowanie:

Kanister zakręcany 5 L

Numer katalogowy:

IS1000A4B2XX1



**Mauzer
1000 L**

Opakowanie:

Mauzer 1000 L

Numer katalogowy:

IS1000A5B4XX1

**GOSPODARSTWO
DOMOWE**



**Trigger
Spray
1 L**

Opakowanie:

Butelka z długą szyjką
Trigger Spray 1 L

Numer katalogowy:

IS1000A7B6X8

Skuteczność
mikrobiologiczna
Procedura/
Mikroorganizm/
Norma/
Czas działania

Bakteriobójczy, w tym: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Enterococcus hirae, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes.

Bójczy wobec grzybów drożdżopodobnych, w tym Candida albicans.

Wirusobójczy wobec wszystkich wirusów otoczkowanych, oznacza wszystkie wirusy otoczkowane wymienione w Annex A normy EN 14476, takie jak HBV, HCV, HIV, jak również wirusy z rodziny orthomyxoviridae (w tym wszystkie wirusy grypy), koronawirusy (w tym MERS-CoV, SARS-CoV-1, i SARS-CoV-2) oraz filowirusy, w tym wirus Ebola. EN 14476 1 min., EN 13727 1 min., EN 13624 1 min., EN 1500 30 s., EN 1276 1 min., EN 1650 1 min., EN 13697 5 min.



beprosave-shop.com



Lek. wet. Aleksandra Dobrzyńska

CEO Medipharm International sp. z o.o. sp. k.

☎ tel. +48 602 108 369

Dawid Dobrzyński

Project Manager

Klienci Kluczowi, Rozwój, Zarządzanie

Wydział Farmacji Warszawski

Uniwersytet Medyczny

☎ tel. +48 602 595 116

Lek. wet. Józef Napierała

Senior Manager

Produkcja, Praktyka, Opinie

☎ +48 602 510 498

Medipharm International sp. z o. o. sp. k.

📍 ul. Emilii Szczanieckiej nr 20b, 64-316 Kuślin

✉ info@beprosave-shop.com

🌐 www.beprosave-shop.com

Polski Producent

medipharm

INTERNATIONAL POLSKA